

Leia atentamente o folheto: este contém informações importantes para o consumidor. Este é um dispositivo médico que está disponível sem prescrição médica. No entanto, a fim de obter uma melhor eficácia, deve ser utilizado de acordo com as indicações descritas.

- Guarde este folheto, pode ter necessidade de o ler.
- Para mais informações ou conselhos, pergunte ao seu médico e / ou farmacêutico.
- Se a sintomatologia persistir após certo tempo, consulte o seu médico.

OFICINAL® GIN PLUS

ÓVULOS VAGINAIS

COMPOSIÇÃO

Sal sódico do ácido hialurónico 10 mg, glicéridos semi-sintéticos, óleo de amêndoas doces.

APRESENTAÇÃO

OFICINAL GIN PLUS apresenta-se sob a forma de óvulos para uso vaginal. A embalagem contém 10 óvulos vaginais de 2 g.

O QUE É E PARA QUE É UTILIZADO

OFICINAL GIN PLUS óvulos exerce a sua atividade graças à presença do ácido hialurónico, um mucopolissacarídeo que está distribuído abundantemente em vários tecidos do corpo. O ácido hialurónico funciona como suporte estrutural dando assim tonicidade, trofismo e elasticidade aos tecidos. Vários estudos clínicos têm demonstrado a capacidade do ácido hialurónico para acelerar e melhorar o processo de epitelização e reparação dos tecidos.

INDICAÇÕES

Tratamento adjuvante de processos reparadores das condições atróficas e distróficas da mucosa vaginal. Promove a cicatrização após o parto, na cirurgia ginecológica, em casos de distrofia resultante de quimioterapia, radiações ionizantes, secura vaginal também devido à deficiência de estrogénio.

QUANDO NÃO DEVE SER UTILIZADO

Não utilize em caso de hipersensibilidade conhecida aos componentes do produto.

Gravidez e aleitamento

Em tais circunstâncias, é necessário consultar o seu médico.

Efeitos na capacidade de condução e na capacidade de utilização de equipamentos ou máquinas


Não são necessárias precauções especiais.

INTERAÇÃO COM OUTROS PRODUTOS

Não são conhecidas interações com outros produtos, por conseguinte, é aconselhável consultar um médico antes de usar **OFICINAL GIN PLUS** óvulos vaginais, em associação com outros dispositivos médicos ou medicamentos para uso vaginal.

COMO UTILIZAR

Retire o óvulo, puxando as duas abas pré-cortadas do blister e insira-o delicadamente na vagina. Lave as mãos antes e após o uso do dispositivo médico.

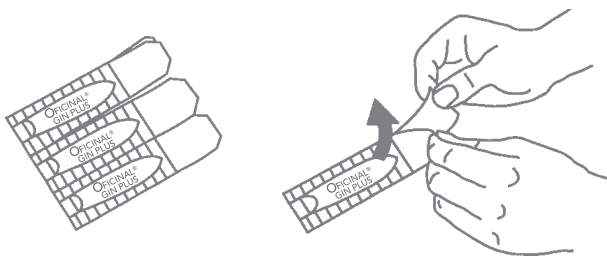

QUANDO E DURANTE QUANTO TEMPO

Use um óvulo por dia, de preferência à noite antes de deitar, ou de acordo com a prescrição médica. A duração do tratamento depende da evolução dos sintomas; se necessário, para melhorar, **OFICIAL GIN PLUS** óvulos pode ser utilizado mesmo durante longos períodos.

EFEITOS INDESEJÁVEIS

A utilização de qualquer produto de uso tópico, especialmente se prolongado, pode causar sensibilidade. Caso isso ocorra, interrompa o tratamento e consulte um médico para iniciar uma terapêutica mais apropriada. Se ocorrerem outros efeitos indesejáveis, informe o seu médico ou farmacêutico.

ADVERTÊNCIAS

Manter fora do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos. Não engolir.

PRAZO DE VALIDADE, CONSERVAÇÃO E ELIMINAÇÃO

O prazo de validade refere-se ao produto na embalagem intacta e conservada corretamente. Não utilize após o prazo de validade ou se a embalagem estiver aberta ou danificada. Conserve o dispositivo médico ao abrigo da luz e do calor, de preferência a uma temperatura entre 4°C e 25°C. O dispositivo médico não deve ser eliminado através da canalização ou do lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os dispositivos médicos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o meio ambiente.

DISPOSITIVO MÉDICO C E 0373

Fabricante:

FARMA-DERMA s.r.l.

Via dell'Artigiano 6-8, 40010 Sala Bolognese (BO)

ITÁLIA (ITALY)

Distribuidor:

NOREVA PORTUGAL - UNIPessoal, LDA

Av. Duque d'Ávila, nº 185, 2º C

1050-082 Lisboa